



SpineShape System IV

Illustration zur Aufbereitungsanleitung


Demontage der Kupplung
(div. Instrumente):

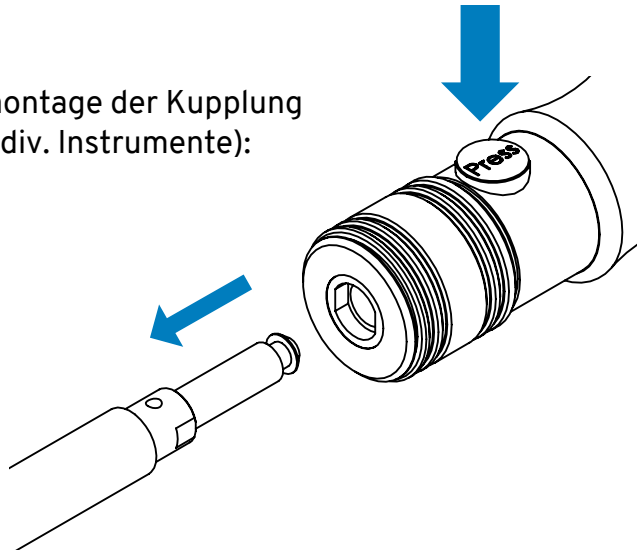

Richtig kuppeln für
Funktionskontrolle:

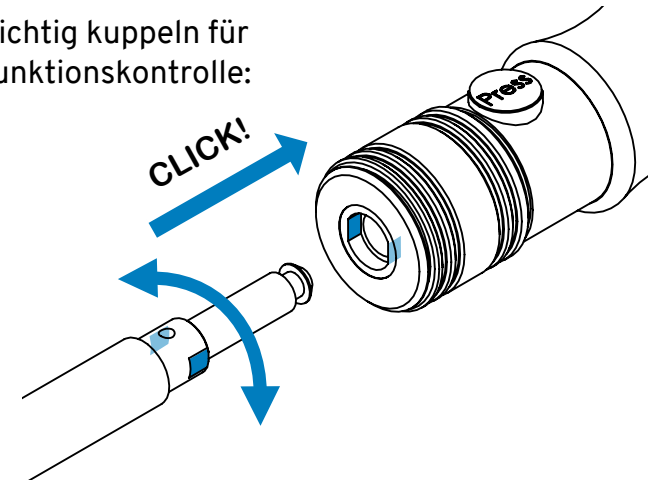


Mehrteilige Instrumente trennen:

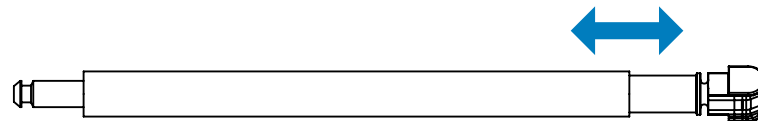

Artikel Ref. 20.010÷11

SpineShape System IV

Illustration zur Aufbereitungsanleitung

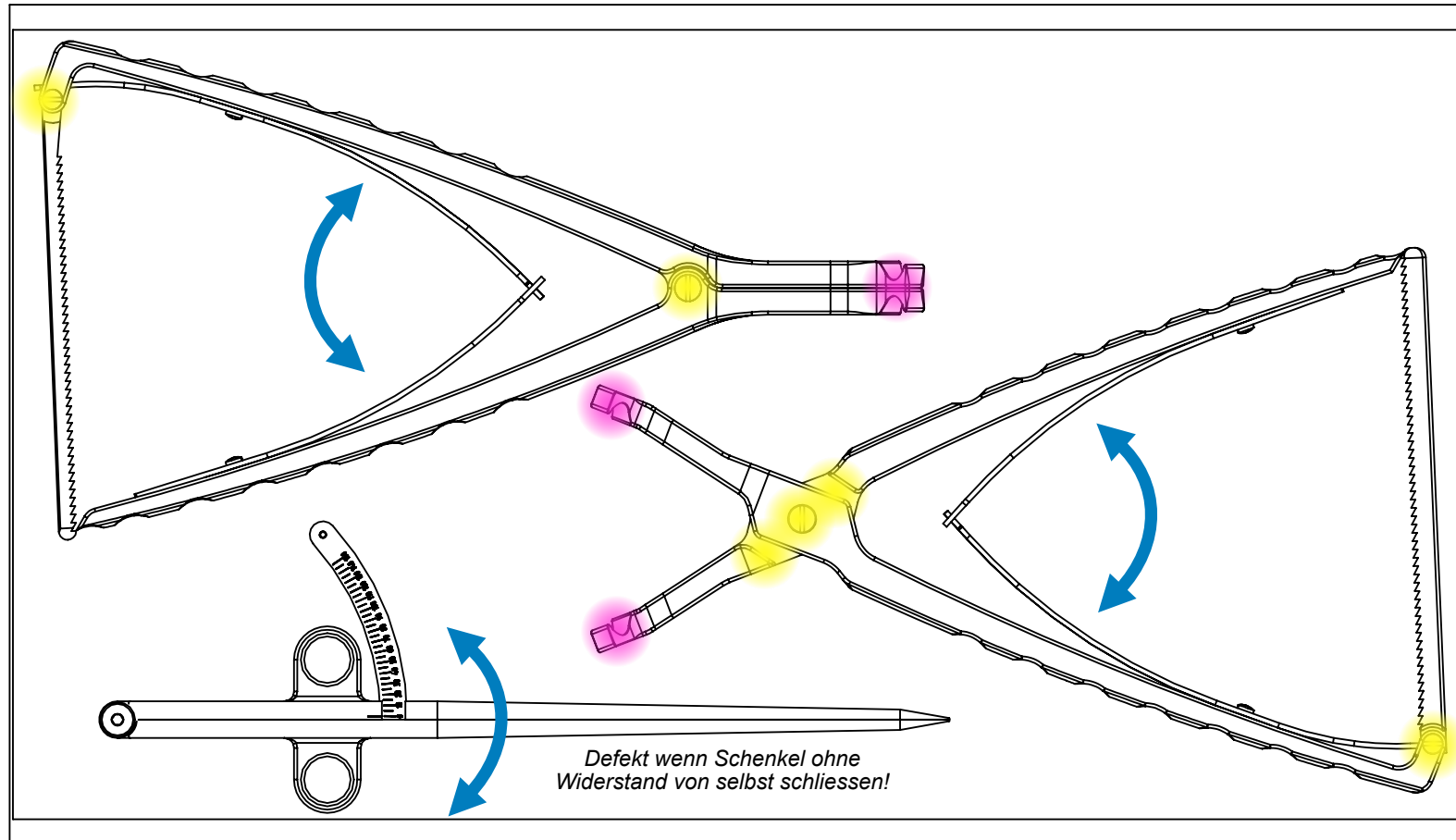

(Unterschiedliche Siebbestückung nach Präferenz der Anwendenden möglich)

↔ Bewegen zur Funktionskontrolle, öffnen fürs Reinigen und Schmieren!


● Sichtkontrolle Funktionsflächen (Brauben, Kerben etc. können den Stab verletzen oder das Passen der Instrumente gefährden)

— Saubere Kanülierung sicherstellen!


● Zwingend schmieren! (mit geeignetem medizinischem Weissöl z.B. Aesculap Sterilit Öl spray)


SpineShape System IV


Illustration zur Aufbereitungsanleitung

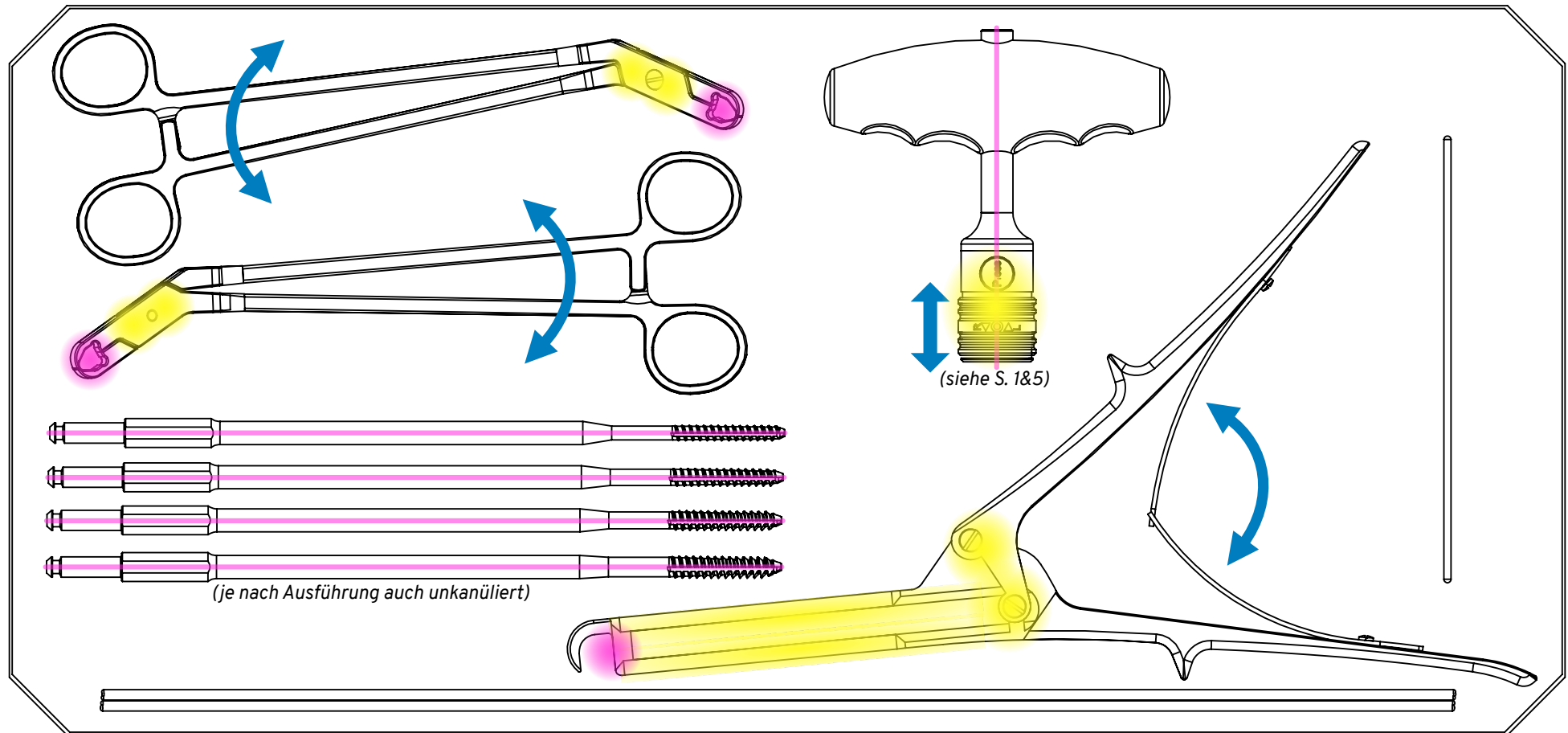


(Unterschiedliche Siebbestückung nach Präferenz der Anwendenden möglich)

 Bewegen zur Funktionskontrolle,
öffnen fürs Reinigen und Schmieren!


 **Sichtkontrolle Funktionsflächen** (Brauben,
Kerben etc. können den Stab verletzen oder
das Passen der Instrumente gefährden)

 **Saubere Kanülierung**
sicherstellen!

 **Zwingend schmieren!** (mit
geeignetem medizinischem Weissöl
z.B. Aesculap Sterilit Öl Spray)

SpineShape System IV

Illustration zur Aufbereitungsanleitung

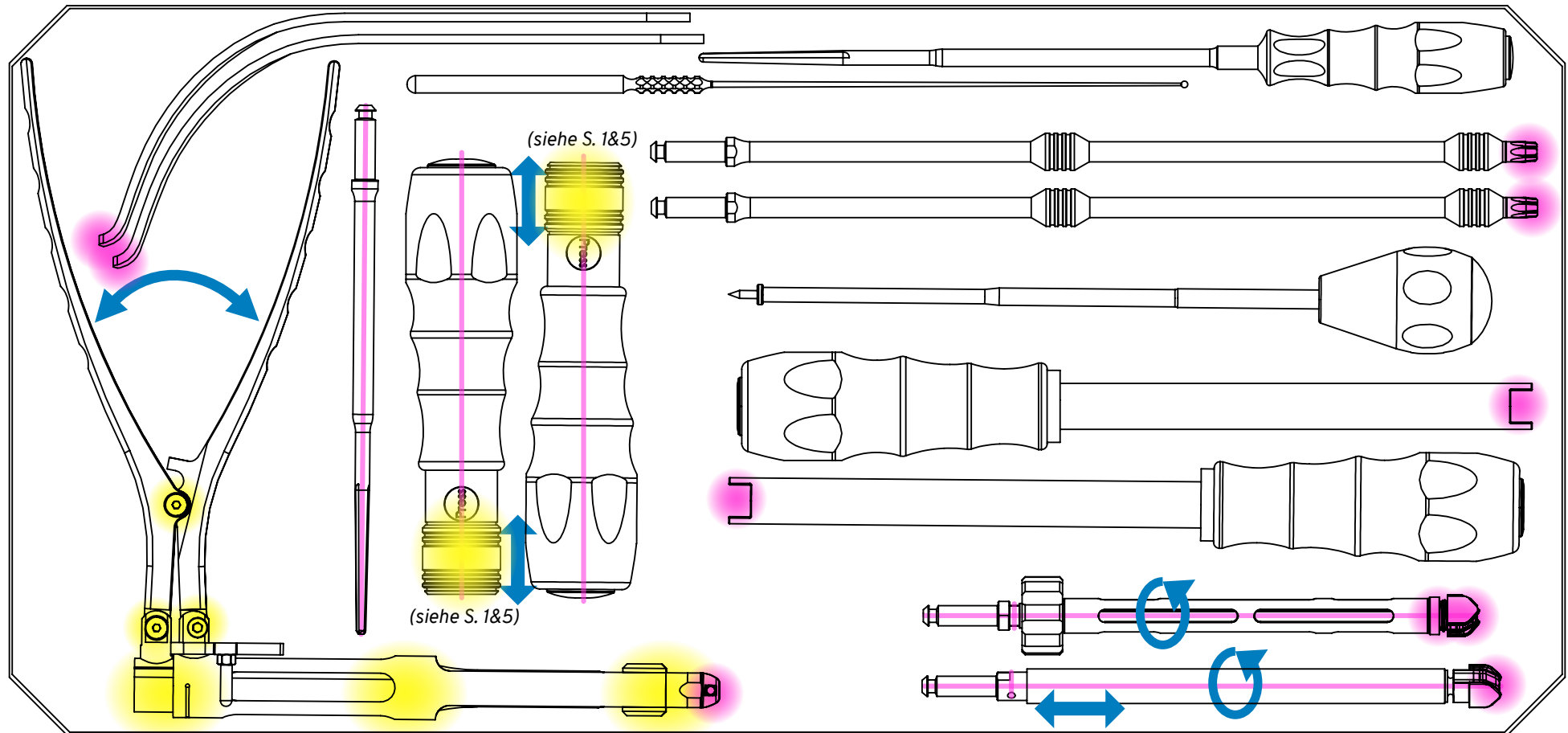

(Unterschiedliche Siebbestückung nach Präferenz der Anwendenden möglich)

↔ **Bewegen zur Funktionskontrolle, öffnen fürs Reinigen und Schmieren!**

● **Sichtkontrolle Funktionsflächen** (Brauben, Kerben etc. können den Stab verletzen oder das Passen der Instrumente gefährden)




— **Saubere Kanülierung** sicherstellen!

● **Zwingend schmieren!** (mit geeignetem medizinischem Weissöl z.B. Aesculap Sterilit Öl Spray)


SpineShape System IV


Illustration zur Aufbereitungsanleitung

Bewegliche Teile nach Schmieren jeweils 3x drücken/schieben/drehen!

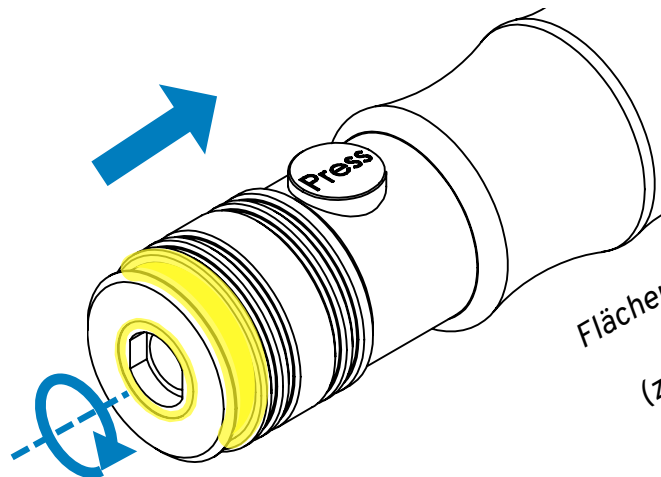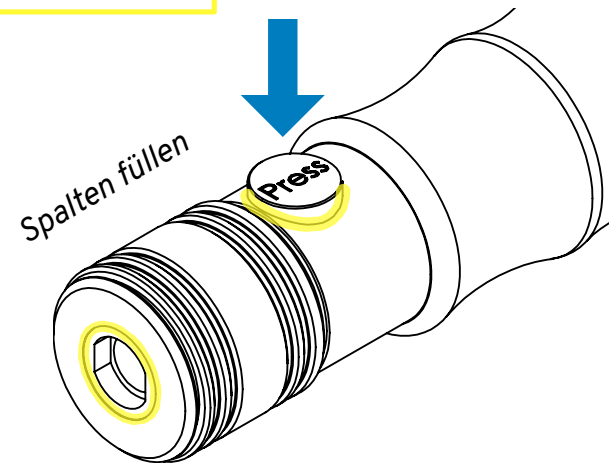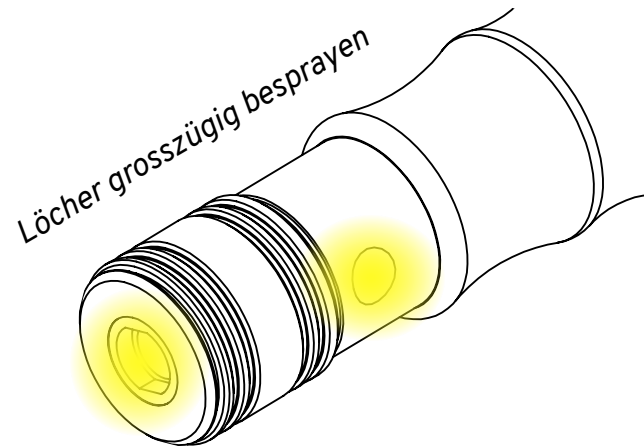

Flächen unter Ratschenring
schmieren
(zum Drehen passendes
Instrument zur Hilfe
nehmen)

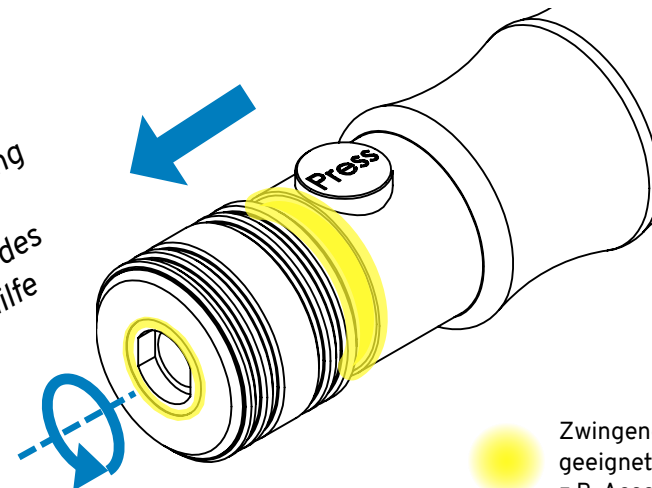

 Zwingend schmieren! (mit
geeignetem medizinischem Weissöl
z.B. Aesculap Sterilit Öl spray)