



# SpineShape System IV

Illustrations pour les instructions sur le retraitement des instruments


Démontage de l'accouplement (div. instruments):

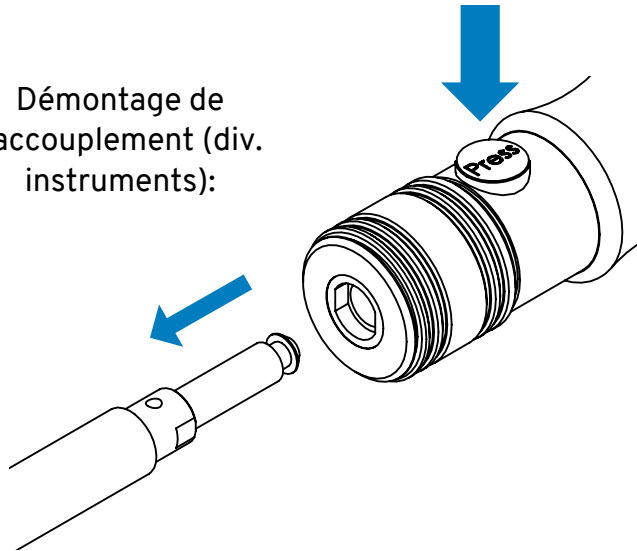

Accoupler correctement pour le contrôle fonctionnel:

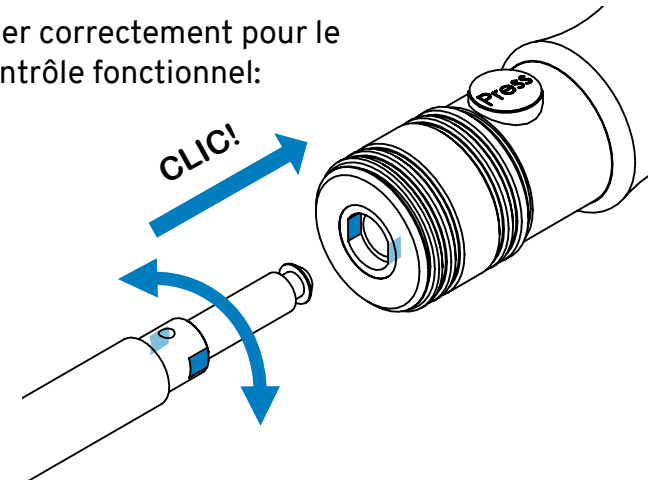


Séparer les divers éléments d'instruments:

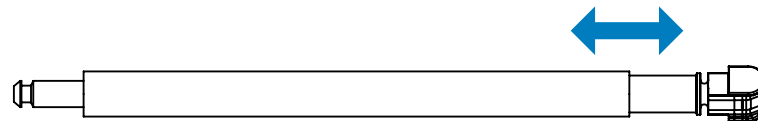

Réf. article. 20.010÷11

# SpineShape System IV

## Illustrations pour les instructions sur le retraitement des instruments

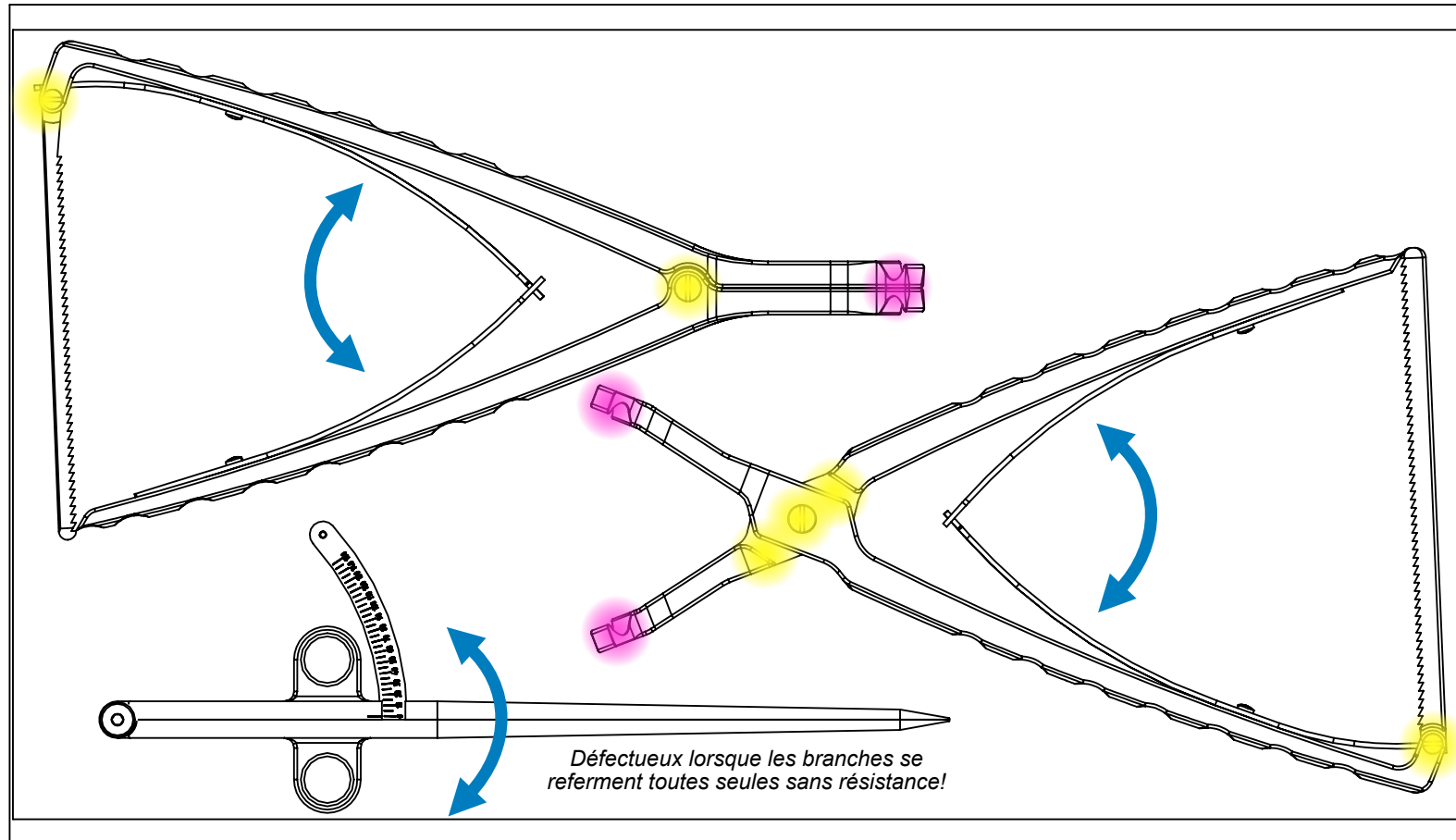

(Divers instruments possibles pour le panier selon les préférences des opérateurs)

↔ Actionner pour le contrôle fonctionnel, ouvrir pour nettoyer et lubrifier!


● Contrôle visuel des surfaces fonctionelles (des entailles, encoches, etc. sont susceptibles d'abîmer la tige ou de risquer l'ajustement des instruments)

— Assurer une canule propre!


● Lubrifier impérativement! (avec une huile blanche médicale appropriée)


# SpineShape System IV


## Illustrations pour les instructions sur le retraitement des instruments

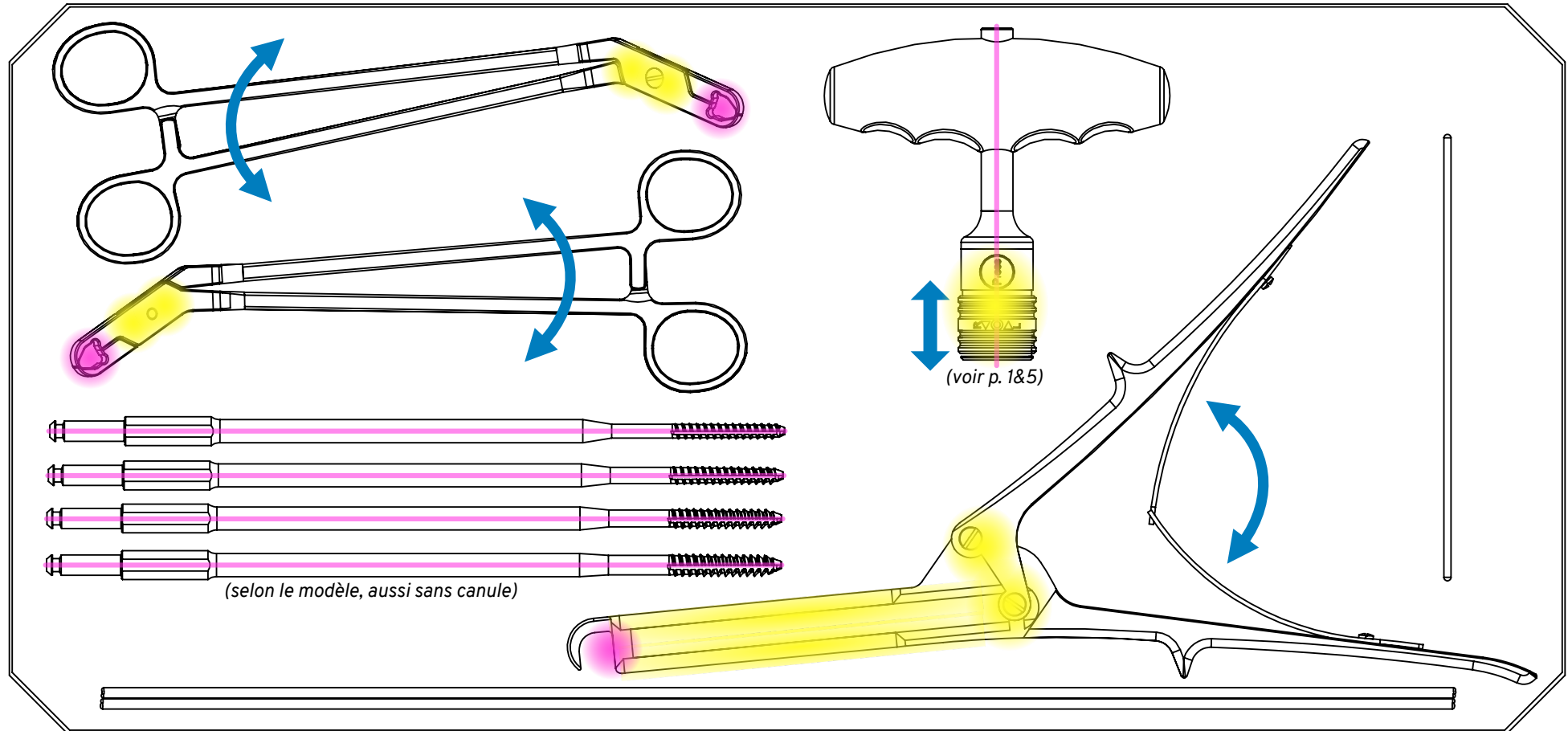


(Divers instruments possibles pour le panier selon les préférences des opérateurs)

 Actionner pour le contrôle fonctionnel, ouvrir pour nettoyer et lubrifier!


 **Contrôle visuel des surfaces fonctionelles** (des entailles, encoches, etc. sont suseptibles d'abîmer la tige ou de risquer l'ajustement des instruments)

 **Assurer une canule propre!**

 **Lubrifier impérativement!** (avec une huile blanche médicale appropriée)

# SpineShape System IV

## Illustrations pour les instructions sur le retraitement des instruments

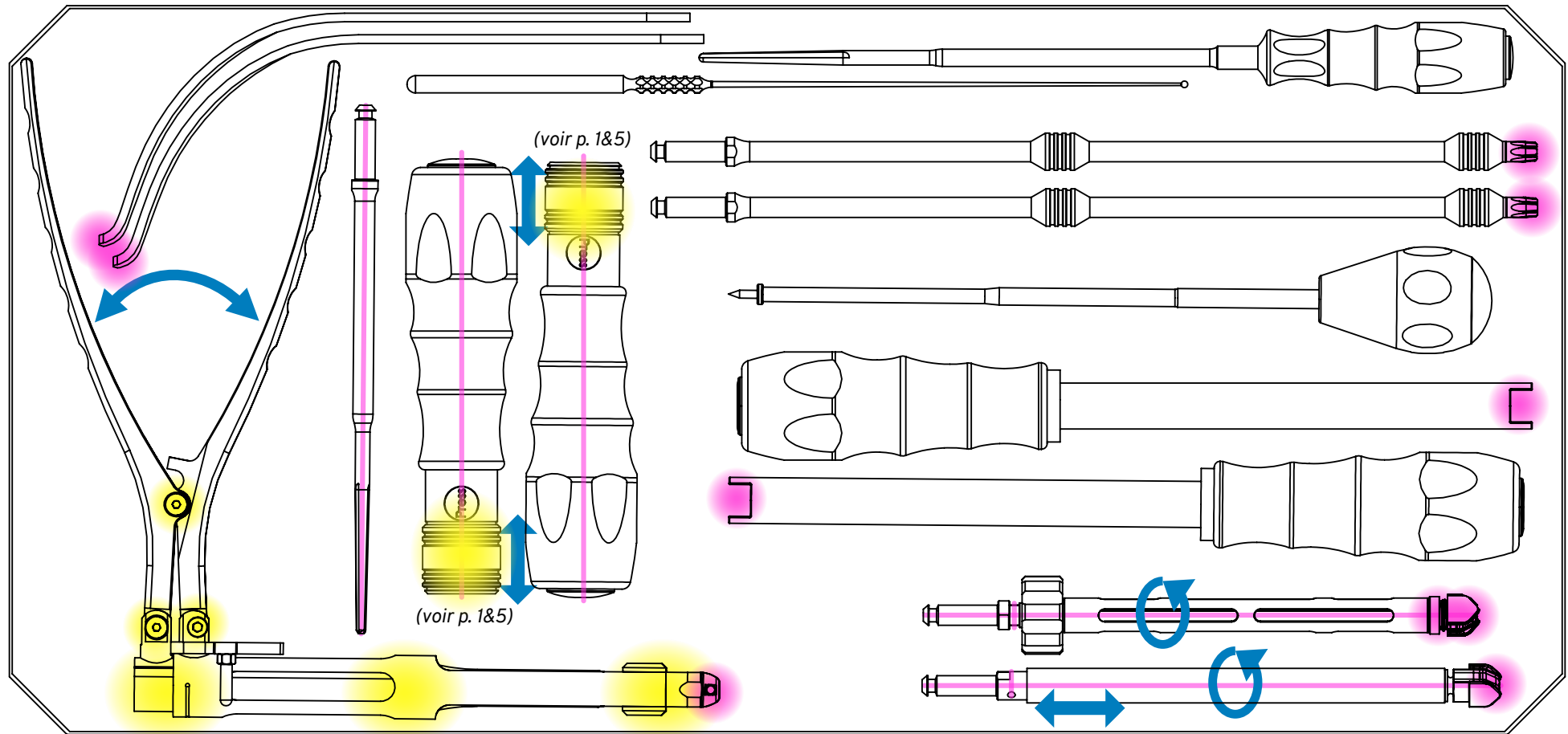

(Divers instruments possibles pour le panier selon les préférences des opérateurs)

↔ Actionner pour le contrôle fonctionnel, ouvrir pour nettoyer et lubrifier!

● Contrôle visuel des surfaces fonctionelles (des entailles, encoches, etc. sont susceptibles d'abîmer la tige ou de risquer l'ajustement des instruments)

— Assurer une canule propre!

● Lubrifier impérativement! (avec une huile blanche médicale appropriée)

# SpineShape System IV

Illustrations pour les instructions sur le retraitement des instruments

Après lubrification, appuyer sur/faire glisser/faire tourner 3x les parties mobiles!

